

Deep Freeze Pain Relief Cold Patch.

Trajno olakšanje hlađenjem. Djeluje poput leda hladeći povrijeđeno ili otečeno područje u trajanju do 3 sata. Terapija hlađenjem za povrede mišića i zglobova je preporučena od strane sportskih fizioterapeuta.

Dvostruko djelovanje:

Olakšanje bola: zasniva se učinkovitom djelovanju efekta hlađenja na smanjenje boli.

Terapija hlađenjem: može da smanji protok krvi u povrijeđenom području te na taj način može pomoći u smanjenju obima ozljede.

Preporučena upotreba: kod iščašenja zglobova, nategnuća, manjih sportskih povreda, napetih, umornih ili ukočenih mišića i zglobova. Takođe se može koristiti za terapiju ublažavanja bola kod artritisa i mišićnih bolova te bolova u leđima za vrijeme trudnoće. Konsultujte ljekara ukoliko simptomi ne prestanu.

Za najbolje rezultate: zalijepiti flaster što je moguće ranije, nakon ozlijede. Brzo ćete osjetiti efekat hlađenja koji će trajati do 3 sata. Novi flaster se može primjeniti po potrebi. Terapija hlađenjem se treba primjenjivati dok se otok ne smanji ili bol ne prestane. Ne koristit više od 4 flastera jedan za drugim na istom mjestu primjene. U slučaju dalje prisutosti simptoma potražiti savjet ljekara.

Upozorenje: Samo za vanjsku potrebu. Ne koristiti na oštećenoj ili nadraženoj koži niti zajedno sa drugim proizvodima za kožu koja se nanosi na isto područje. Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti na bilo koji sastojak. Odmah prestati koristiti flaster ako se pojavi osip, iritacija ili crvenilo. Ne koristiti u blizini očiju. Ne koristiti kod dojančadi ili osoba koje ne mogu same da skinu flaster. Upotreba kod male djece mora biti pod nadzorom. Kod dijabetesa, slabe cirkulacije, trudnoće, dojenja ili nekih drugih oboljenja kože prije upotrebe potražiti savjet liječnika. U slučaju nadraženost kože prekinuti upotrebu. Flasteri se mogu koristiti sa lijekovima protiv bolova koji se uzimaju na usta.

Uputa za upotrebu: Nanijeti na suhu i čistu kožu. Otvoriti pakovanje, ukloniti zaštitu i skinuti plastičnu foliju. Nanijeti ljepljivi dio flastera na željeno područje. Ne rezati flaster. Zatvoriti pakovanje koje ste otvorili da spriječite isušivanje ostalih flastera. Upotrijebite flastere u roku od mjesec dana od otvaranja. Flasteri se mogu upotrebiti samo jedanput. Bacite flastere nakon upotrebe. Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Ne držite u frižideru ili zamrzivaču.

Proizvođač: The Menthoaltum Company Limited, East Kilbride G 745PE, Velika Britanija.

Uvoznik: Oktal Pharma d.o.o , Pijačna 14a, Sarajevo. Serijski broj i rok trajanja otisnuti na ambalaži. Br.potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava: 06-07.4-1-2298-1/16 od 08.09.2016.